


KVISTBERGA™

CareSlope®

Bruksanvisning
Produktblad



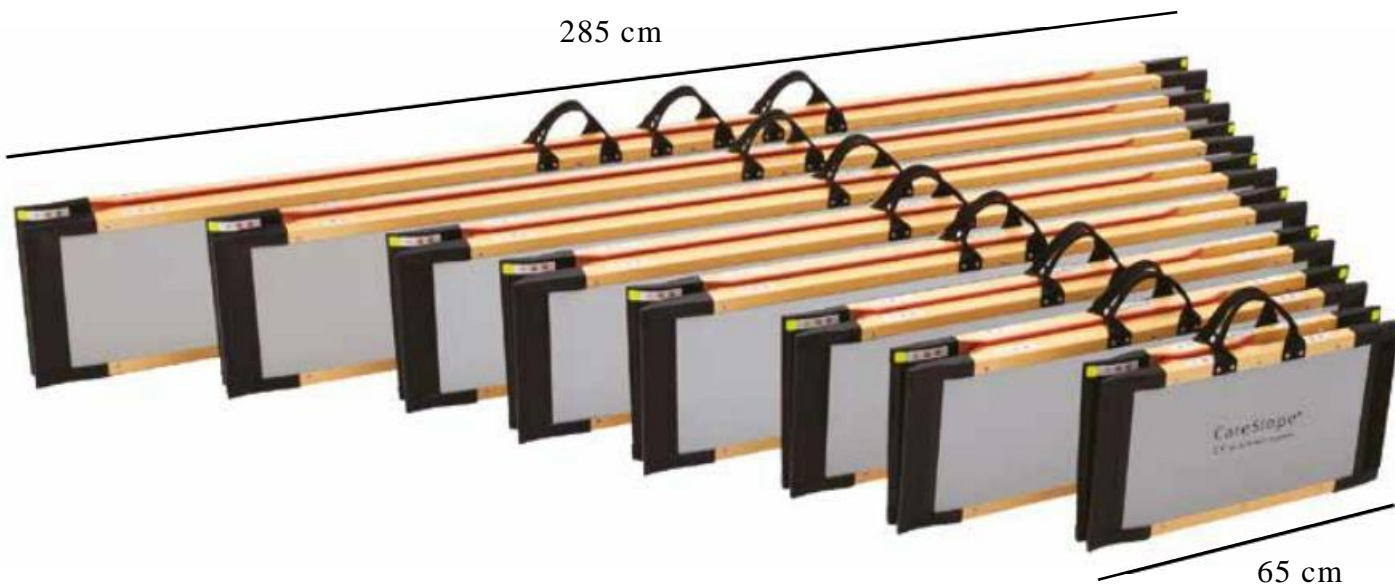


Vilken ramp ska jag välja? Mät höjden och se vilken ramp du behöver i tabellen nedan:

Total längd	Artikel nr.	Lutning: 8° Steghöjd i cm <i>Litet behov av assistans</i>	Lutning: 10° Steghöjd i cm <i>Måttligt behov av assistans</i>	Lutning: 15° Steghöjd i cm <i>Stort behov av assistans</i>
65 cm	CSE-65	9 cm	11 cm	15 cm
100 cm	CSE-100	13 cm	17 cm	24 cm
120 cm	CSE-120	16 cm	20 cm	30 cm
150 cm	CSE-150	20 cm	25 cm	37 cm
175 cm	CSE-175	24 cm	30 cm	43 cm
200 cm	CSE-200	27 cm	34 cm	50 cm
240 cm	CSE-240 C	33 cm	41 cm	60 cm
285 cm	CSE-285 C	39 cm	49 cm	73 cm

Använd ramper som är 4 gånger så långa som steghöjden.


INSTRUKTIONER

1

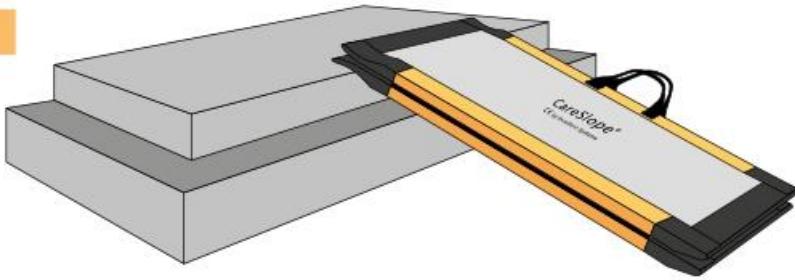


Placera rampen mot underlaget.

2

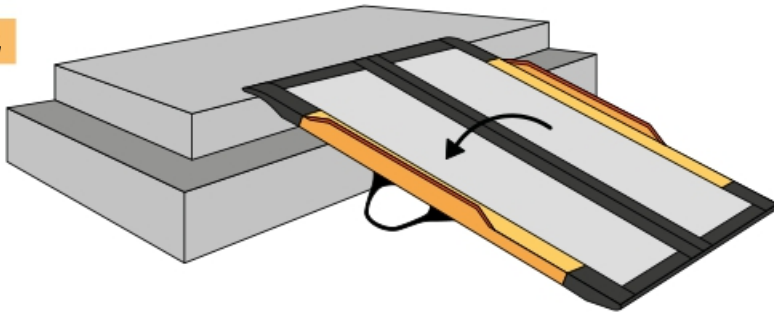


Fäll ut rampen.

3

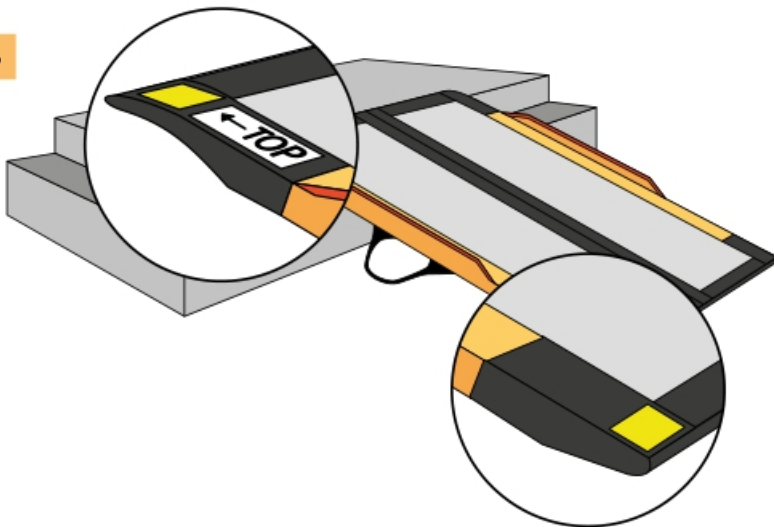

Titta på märkningen på rampen för att säkerställa att rampen ligger åt rätt håll.

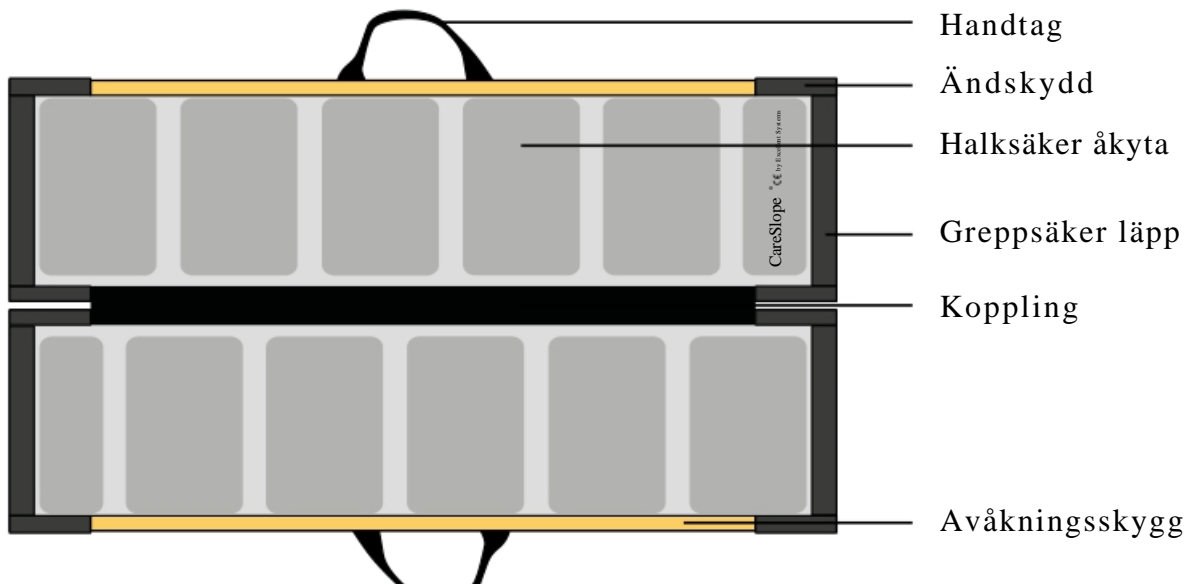

CARESLOPE® PRODUKTER SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Max last: Max 300 kg.

Använd **INTE** CareSlope produkter till någonting annat än personförflyttning.

Material:

Glasfiber och aluminium.
Ramperna CSE-240 C och CSE-285 C är förstärkta med kolfiber.
Samtliga CareSlope ramper är utrustade med anti-halk yta.

Synlighet:

CareSlope ramperna har en reflextejp monterad i vardera hörn för maximal synlighet.

Inpassning:

Använd inte ramperna för högre steg än rekommenderat.
Se tabell på sidan 2.

Följ alltid lokala säkerhetsinstruktioner.

Installation:

Ramperna kan användas både inom- och utomhus.
De ska placeras på en plan yta och ytan ska vara fri från snö, is, smuts och grus eller annat som kan påverka att rampen inte ligger stadigt mot underlaget.

Kontrollera regelbundet att produkten inte har några skador eller förslitningar.
Säkerställ att produkten är placerad på rätt håll.
Säkerställ att övre läppen på rampen ligger 4 cm in på kontaktytan på steget och att nedre delen av rampen ligger stabilt.

Användning:

Kontrollera alltid rampen efter skador innan användning.
Använd handtagen för att frakta rampen samt vid ut- och ihopfällning av rampen.

Undvik vassa klackskor eller andra hårda föremål på ramperna då dessa kan skada ytan.

Kör upp framhjulen rakt upp på rampen och kontrollera att rampen ligger stabilt, fortsätt sedan att köra rakt upp eller ner för rampen. Det är inte tillåtet att köra vertikalt på rampen då detta innebär en risk för att rullstolen välter.

Gör inga kraftiga stopp eller ändra riktning under förflyttning på rampen.

Säkerställ att rullstolens drivringar inte stöter emot eller skadar rampens aluminiumkanter.

Viss klämrisk finns så var försiktig när du fäller ihop rampen.



Användning:

Vid färd nedåt bör rullstolen backas och en assistent finnas tillgänglig.

Lämna inte rampen i direkt soljus under längre stunder.

Lagring:

CareSlope bör förvaras och lagras inomhus. De får inte lagras i temperaturer över 70°C då detta kan skada gummilisterna.

Lagra inte CareSlope i en fuktig eller kall miljö då detta kan skada handtagen.

CareSlope ska med fördel lagras och förvaras liggandes på långsidan.

Rengöring:

Lätt rengöring: Rengör med vatten och en mjuk borste.

Grovrengöring: Använd vanligt rengöringsmedel så som diskmedel eller Allrent.

Använd inte skarpa eller alkaliska rengöringsmedel, ozonrengöring eller ångrengöring.

Garanti:

Garantitid 2 år och täcker endast reparationskostnad av rampen.

Skador som uppstått på grund av oaktsamhet eller att produkten inte använts enligt beskrivningarna i denna bruksanvisning omfattas inte av garantin.

Återvinning:

CareSlope ramper är helt återvinningsbara. Återvinn som metallskrot. De kan återlämnas till Kvisberga Group AB som tar hand om återvinningen.

Återförsäljare

KVISTBERGA™

Kvistberga Group AB
Lancashirevägen 5C
735 60 RAMNÄS

021-661 00

www.kvistberga.se
info@kvistberga.se

CE



excellent systems as

Products designed, Pat. Pend. and produced in Japan by Care-Medics
Distributed by Excellent Systems A/S & Kvistberga Group AB